



neodisher® MediZym

tekutý, pH neutrální čisticí přípravek
pro použití ve speciálních myčkách

- Hlavní oblasti použití:** Strojní čištění chirurgických nástrojů, vybavení pro anesteziologii, flexibilních endoskopů, kontejnerů a jiného zdravotnicko-technického vybavení.
- Charakteristika:** neodisher® MediZym je z hlediska životního prostředí zvláště šetrný čisticí přípravek na pH neutrální bázi s enzymy a dalšími složkami, podporujícími čisticí účinek. Výborně odstraňuje zbytky zaschlé a denaturované krve za současného vysokého stupně ochrany materiálu.
- Vůči roztokům přípravku neodisher® MediZym jsou odolné např. nerez, nástrojová ocel, lehké kovy, sklo, běžné plasty i materiály anesteziologického vybavení a flexibilní endoskopy.
- Použití a dávkování:** Pro strojní mytí nástrojů: 0,2 – 1 % (2 - 10 ml/l) při teplotách 40 – 50 °C.
Pro strojní mytí flexibilních endoskopů: 0,5 % (5 ml/l).
- Pro ruční čištění:
v ponorné lázni: 0,5 – 2 %, 20 – 30 min.
v ultrazvukové lázni: 0,5 - 2 %, 5 – 10 min.
Používaný roztok může být zahřát maximálně na 45 °C.
- Pracovní roztok je nutné minimálně jednou za den měnit.
- Následně musí být roztok neodisher® MediZym kompletně odstraněn účinným oplachem.
- Nesměšujte s jinými přípravky. Pouze pro profesionální použití.
- Technické údaje:** Specifická hmotnost (20 °C): 1,0 g/cm³
Rozsah pH (stanovený v demineralizované vodě, 45 °C) 0,2 - 2 %: 7,6 – 7,7
- Složení:** < 5 % anionaktivních tenzidů
dále enzymy, konzervační složky (phenoxyethanol, methyl-, ethyl-, butyl-, propyl-, isopropylparaben)
- Pokyny ke skladování:** Skladujte v chladu, při teplotách nad 0 °C. Při správném skladování je doba použitelnosti 2 roky od data výroby.
- Upozornění na nebezpečí a bezpečnostní pokyny:** Viz. bezpečnostní list přípravku.

